

*Esterilização de
posicionadores
odontológicos
autoclaváveis*

Material didático instrucional desenvolvido por:


Gabriel Pereira Melandes
Gabrielle Cristiny Moreira
Laura Tannus Mendes Coelho
Taís Ferreira Sudré

Orientado por:

Profa. Dra. Francielle Silvestre Verner
Profa. Dra. Larissa de Oliveira Reis

Passo-a-passo

1. Após o uso, todos os posicionadores devem ser desmontados e higienizados com água e sabão.

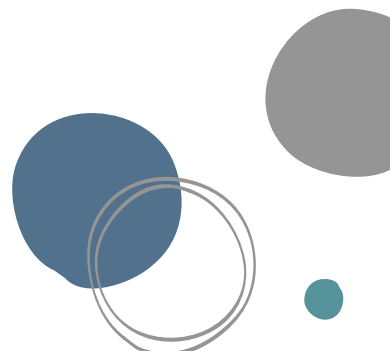

2. Cada item deve ser corretamente seco com auxílio de toalhas de papel.



3. Os posicionadores devem ser embalados separadamente no grau cirúrgico, totalizando 4 pacotes, sendo eles:
- 1 pacote para peças desmontadas do posicionador para dentes anteriores
 - 1 pacote para peças desmontadas do posicionador para os dentes posteriores (superior direito/ inferior esquerdo)
 - 1 pacote para peças desmontadas do posicionador para os dentes posteriores (superior esquerdo/ inferior direito)
 - 1 pacote com o posicionador para radiografias interproximais.



4. Por fim, todos os pacotes devem ser vedados, com auxílio da seladora.

